

**VACUSERA® ESR ШТАТИВ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****НАЗНАЧЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

VACUSERA® ESR штатив предназначен для пробирок VACUSERA® ESR, тестирования скорости осаждения эритроцитов (ESR)

ОПИСАНИЕ

Номер по каталогу	Наименование продукции	GMDN код
234901	VACUSERA® 2 мл ESR штатив	15186

VACUSERA® ESR ШТАТИВ без градуировочной шкалы.

Продукция не имеет сроков годности.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Аккуратно переверните пробирку VACUSERA® 2 мл ESR 5-10 раз сразу же после сбора крови, чтобы достичь правильного соотношения цитрата и крови. Неправильное перемешивание может привести к свертыванию и / или неправильным результатам СОЭ.
Рекомендуется использовать шейкер.
- Откройте заглушку
- Пипетку VACUSERA® ESR поместите в прозрачную пробирку, и кровь автоматически заполнит нулевой линией пипетки.
- Поместите пробирку ESR и пипетку в штатив. Пробирка и пипетка должны находиться в вертикальном положении.
- Через 60 минут зарегистрируйте уровень эритроцитов, оставшихся в пипетке и супернатантной плазме.
- После анализа выкиньте пробирку VACUSERA® 2 мл ESR, крышку не открывать.






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Тест ESR чувствителен к температуре, углу наклона пробирки и вибрации. Важно разместить штатив на ровной поверхности, где нет сквозняков. Избегайте размещения штатива рядом с окнами, центрифугами, вентиляционными отверстиями и т. Д.
- Не настраивайте положение пробирки в стойке, держась за пробку.
- Не используйте, если упаковка повреждена.
- Утилизируйте в соответствии с местными правилами

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Избегайте попадания прямых солнечных лучей

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Номер по каталогу
	Номер партии
	Не использовать, если упаковка повреждена
	См. инструкцию по применению
	Для лабораторной диагностики